

# SECTION 01

---

SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM  
セルフライゲーティング ブラケット システム

---

CLIPPY-C / CLIPPY MicroMini RC / mini CLIPPY / CLIPPY-L / CLIPPY TUBES



# CLIPPY® より使いやすく、より美しく

それがTOMYセルフライゲーティング  
ブラケット“クリッピー”です。

【クリッピー】

CLIPPY-C  
CLIPPY-C 2G  
クリッピー-C / クリッピー-C 2G

CLIPPY Micro/Mini RC  
クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング

mini CLIPPY  
ミニクリッピー

CLIPPY-L  
クリッピー-L



## ／より美しい歯列矯正の実現へ

クリッピーには、ナチュラルな白さが際立つセラミックブラケット、小さくてすっきりした印象のメタルブラケット、リングルブラケットなど、様々なご要望に対応しています。

## ／ワイヤー交換も簡単でスムーズ

開閉が容易なクリップを採用したことにより、ワイヤー交換が簡単でスムーズに行えます。また、リガチャーワイヤーやモジュールなどを用いずに結紮できるので、口腔内のケアが行いやすいこともメリットです。

## ／歯牙移動を柔軟にコントロール

クリッピーの大きな特長は、治療の各段階に合わせて、適切なワイヤーとブラケットの固定度合いを選べることです。歯牙移動を柔軟にコントロールして、より短い時間で治療効果を上げるとともに、患者さんの負担も軽減します。

## ／充実したメカニズム

ボンディング材を選ばないメカニカルロックベース、正面とジンジバル方向から開閉ができるロジウムコーティング\*された開閉クリップなど、トミーテクノロジーを駆使したメカニズムを採用しています。

\*クリッピーCに採用

### クリッピーの特性 CLIPPY Series for labial<sup>※1</sup>

ストレートワイヤーテクニックの治療結果を評価する基準として、Dr.アンドリュースの「シックスキー」つまり6つの鍵が提唱されています。その6つの鍵を達成する方法として、スペーシング、アンギュレーション、インクリネーション、ローテーションコントロールなどの調整にある程度の力を加えることが必要とされています。それを可能にしたセルフライゲティングブラケットがクリッピーです。ワイヤーを交換することにより、治療初期から後期まで、必要に応じた矯正力・コントロールを選択することが可能で、従来の結紮作業を伴った治療効果と同様な結果を得ることができます。

### 3つのステージ CLIPPY Series for labial<sup>※1</sup>

クリッピーは、ワイヤーとブラケットの固定度合いにより「パッシブ」「インタラクティブ」「アクティブ」の3つのステージに分類されます。治療初期から後期まで、それぞれの段階に応じたステージを選ぶことで、適切な治療を行うことができます。

#### 1 パッシブ ステージ


ラウンドワイヤーが自由にスライドし、ワイヤーの特性を十分に発揮することができます。弱い矯正力で歯牙のレベリングやアライメントが可能です。

#### 2 インタラクティブ ステージ

スクエアワイヤーがクリップに触れることなくスロット内に収まるため、ある程度のトルク及びローテーションコントロールが可能です。スムーズに歯牙移動を行うことができます。前歯のリトラクションには適切なステージです。

#### 3 アクティブ ステージ

レクタングラーワイヤーが完全にクリップで固定されるため、十分なアクティブコントロールが可能です。ブラケットのプリスクリプションが発揮されます。

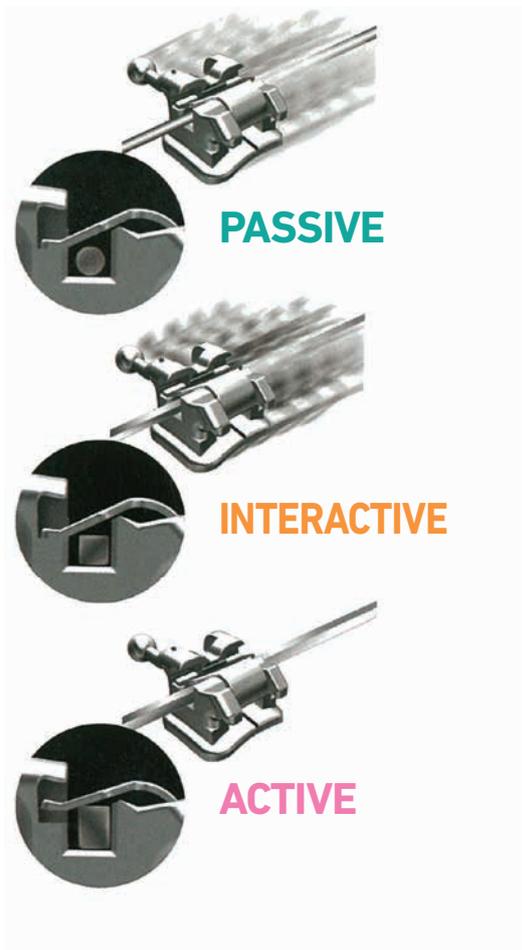

Slot Sizes	Archwire Sizes		
	PASSIVE	INTERACTIVE	ACTIVE
.018" Slot	.014 .016 .016 × .016	.018 × .018	.016 × .022 .017 × .025 .018 × .025
.022" Slot	.016 .018 .018 × .018	.019 × .022 .020 × .020	.018 × .025 .019 × .025 .021 × .028 <sup>※2</sup>

※1 クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティングの小臼歯は、パッシブ仕様となります。

※2 クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティングは、.021×.025となります。

## CLIPPY-C

## クリッピーC セラミックセルフライゲータリング ブラケット



ロジウムコーティングされたクリップは、審美性を高めます。また治療期間を通じてブラッシングで剥がれたり、食物色素で着色することがありません。耐久性にすぐれたコーティングです。そしてこの独自のクリップ形状は、ブラケット正面からの開閉を可能にし、ワイヤー交換が容易に行えます。



リベットロック\*(Rivet-Lock)ベースは、ボンディング材を選ばずにご使用いただけます。  
\*メカニカルロックベース



CIM(Ceramic Injection Molding)製法によって、ブラケットの表面は滑らかにかつ精密に製造されています。また、HIP(高温高圧処理)の採用により、ブラケットの強度及び透光性を高めました。



CLIPPY-C



CLIPPY-C 2G



CLIPPY-C OPA-K®



## CLIPPY MicroMiniRC

## クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング セルフライゲータリング ブラケット



ロジウムコーティング施工  
メタルブラケットでありながら、高い審美性を実現しました。

ロープロファイル&コンパクト設計  
ミニクリッピーのコンパクトさをさらに小型化

小白歯 パッシブ仕様




## mini CLIPPY

## ミニクリッピー セルフライゲータリング ブラケット

ミニクリッピーは、その独自の構造と操作性でさまざまなメリットをもたらします。



部位の識別が簡単  
IDマーキングとベース面のレーザーマーキングにより、部位の識別が簡単にできます。

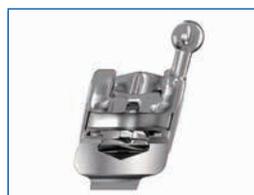


- ・インターブラケットスパンが広くなり、重度の叢生にもワイヤーを装着することが可能です。
- ・装着時における違和感を軽減します。

# CLIPPY TUBES

## クリッピーチューブ セルフライゲーティング バッカルチューブ




クリッピーシリーズに採用しているクリップ機構を継承し、6番大白歯用に開発されました。他のクリッピーと同様に、ワイヤー交換をきわめて容易に行うことが可能です。

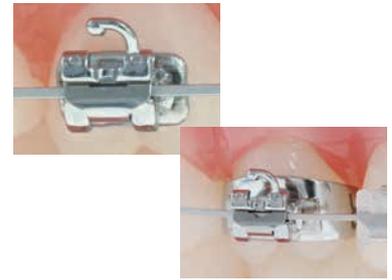

## ／クリップの開閉方法


### OPEN

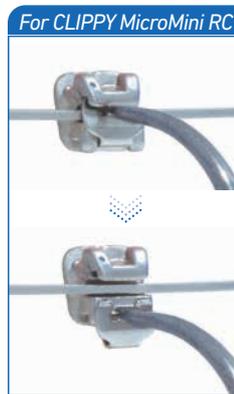

813-1050

オープニングツール (Vツール)

販売名：オープニングツール(Vツール)  
一般的名称：歯科矯正用紐さつ器  
届出番号：11B3X00012000049 一般医療機器

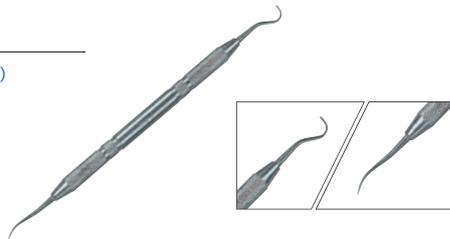

### CLOSE



指でクリップをスライドさせて閉める

### ディボンディング インストルメント



802-1008

ワンダーリムーバー

販売名：ワンダーリムーバー  
一般的名称：歯科矯正用プライヤ  
届出番号：11B1X1000639D114 一般医療機器

## OPA-K Maxillary Arch

クリッピー C OPA-K 上顎



OPA-K用に開発されたクリッピーC。  
日本人のためのアプライアンスをセルフライゲージングで実現しました。  
OPA-Kの特長を受け継ぎ、形状をよりコンパクトに抑えています。  
下顎小臼歯もラインナップされた、上下顎5-5でご用意しております。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity		
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		12°	3°	0°	3.2	L	1686-101L	1686-102L	10個/ PK		
						R	1686-101R	1686-102R			
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		8°	6°	0°	3.0	L	1686-201L	1686-202L			
						R	1686-201R	1686-202R			
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-3°	7°	0°	3.2	L	1686-301L	1686-302L		Hook付き	
						R	1686-301R	1686-302R		Hook付き	
Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4   4		-3°	7°	0°	3.2	L	1686-303L	1686-304L		10個/ PK	
						R	1686-303R	1686-304R			
Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4   4		-7°	0°	0°	3.2	L	1686-401L	1686-402L			Hook付き
						R	1686-401R	1686-402R			Hook付き
Upper 1st Bicuspids 上顎 第1小臼歯 4   4		-7°	0°	0°	3.2	L&R	1686-4030	1686-4040			
Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小臼歯 5   5		-7°	0°	0°	3.2	L	1686-501L	1686-502L			Hook付き
						R	1686-501R	1686-502R			Hook付き
Upper 2nd Bicuspids 上顎 第2小臼歯 5   5		-7°	0°	0°	3.2	L&R	1686-5030	1686-5040			
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3							1686-01	1686-02	12個/ KIT		
							1686-01H	1686-02H			Hook付き
5 ~ 5 5 ~ 5							1686-001	1686-002	20個/ KIT		
							1686-001HA	1686-002HA			Hook付き




販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器


# OPA-K Mandibular Arch

クリッピー C OPA-K 下顎

ブラケット・マーキング色

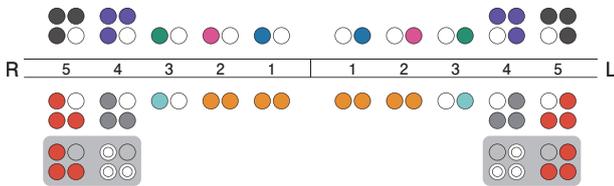

ゲージ識別色

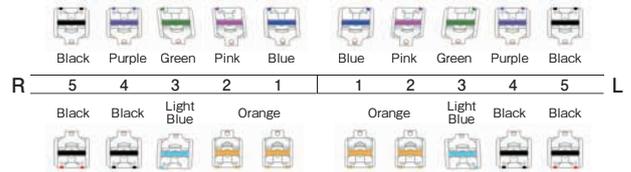

注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スクレーラー、探針等で取り外してご使用ください。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2   1   2		1°	0°	0°	2.8	L&R	1686-1110	1686-1120	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3   3		-6°	3°	0°	3.2	L	1686-311L	1686-312L	Hook付き
		-6°	3°	0°	3.2	R	1686-311R	1686-312R	Hook付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4   4		-12°	0°	0°	3.2	L	1686-411L	1686-412L	Hook付き
		-12°	0°	0°	3.2	R	1686-411R	1686-412R	Hook付き
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5   5		-12°	0°	0°	3.2	L&R	1686-4130	1686-4140	
		-17°	0°	0°	3.2	L	1686-511L	1686-512L	Hook付き
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5   5		-17°	0°	0°	3.2	R	1686-511R	1686-512R	Hook付き
		-17°	0°	0°	3.2	L&R	1686-5130	1686-5140	
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4   4		-12°	0°	0°	3.0	L	956-411L	956-412L	Post付き
		-12°	0°	0°	3.0	R	956-411R	956-412R	Post付き
mini CLIPPY		-12°	0°	0°	3.0	L&R	956-4130	956-4140	
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5   5		-17°	0°	0°	3.0	L	956-511L	956-512L	Post付き
		-17°	0°	0°	3.0	R	956-511R	956-512R	Post付き
mini CLIPPY		-17°	0°	0°	3.0	L&R	956-5130	956-5140	

CLIPPY-C  
APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッケルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

## Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー C 2G フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



クリッピー Cをよりコンパクトに設計した“クリッピー C 2G”  
 機能はそのまま継承し、口元の審美性向上と、口腔内の違和感を軽減します。  
 スペックはロスタイプ、上下5-5でご用意しております。




		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot		Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		12°	5°	0°	3.2	L R	1671-101L 1671-101R	1671-102L 1671-102R		10個/ PK
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		8°	9°	0°	3.0	L R	1671-201L 1671-201R	1671-202L 1671-202R		
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-2°	13°	4°M	3.2	L R	1671-301L 1671-301R	1671-302L 1671-302R	Hook付き Hook付き	
		-2°	9°	4°M	3.2	L R	1671-305L 1671-305R	1671-306L 1671-306R	Hook付き Hook付き	
Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 5 4   4 5		-7°	0°	2°D	3.2	L R	1671-401L 1671-401R	1671-402L 1671-402R	Hook付き Hook付き	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-10°	0°	14°D	4.0	L R	(W)952-607L (W)952-607R	(W)952-608L (W)952-608R		10個/ PK

# CLIPPY-C APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZ00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZ00191000 管理医療機器


## Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー C 2G フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

### ブラケット・マーキング色

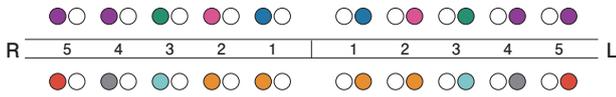

注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。  
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

### ゲージ識別色

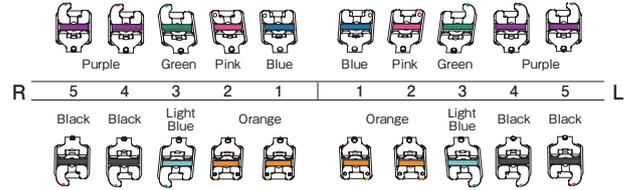

注: ブラケット接着後、サイトゲージを、スクレーラー、探針等で取り外してご使用ください。

	Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 21   12	-1°	2°	0°	2.8	L R	1671-111L 1671-111R	1671-112L 1671-112R	10個/ PK
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3   3	-11°	7°	2M°	3.2	L R	1671-311L 1671-311R	1671-312L 1671-312R	
Lower 1st Bicuspid 下顎 第1小白歯 4   4	-17°	-1°	4D°	3.3	L R	1671-411L 1671-411R	1671-412L 1671-412R	
Lower 2nd Bicuspid 下顎 第2小白歯 5   5	-22°	-1°	4D°	3.3	L R	1671-511L 1671-511R	1671-512L 1671-512R	
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3						1671-01H	1671-02H	
5 ~ 5 5 ~ 5						1671-001HA	1671-002HA	20個/ KIT
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1 大白歯 6   6	-25°	0°	4D°	4.0	L R	(W)952-611L (W)952-611R	(W)952-612L (W)952-612R	10個/ PK

## Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲーティングブラケットです。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		12°	5°	0°	3.4	L R	168-101L 168-101R	168-102L 168-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		8°	9°	0°	3.2	L R	168-201L 168-201R	168-202L 168-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-2°	13°	4°M	3.4	L R	168-321L 168-321R	168-322L 168-322R	Hook付き
		-2°	13°	4°M	3.4	L R	168-303L 168-303R	168-304L 168-304R	Hook付き
Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 5 4   4 5		-7°	0°	2°D	3.4	L R	168-421L 168-421R	168-422L 168-422R	Hook付き
		-7°	0°	2°D	3.4	L R	168-403L 168-403R	168-404L 168-404R	Hook付き
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-10°	0°	14°D	4.0	L R	(W)952-607L (W)952-607R	(W)952-608L (W)952-608R	10個/ PK




販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパツカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

# Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch


クリッピー C フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

ブラケット・マーキング色

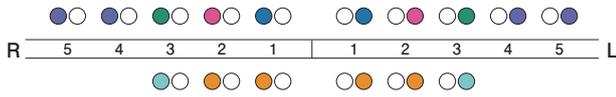

注：左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。

ゲージ識別色

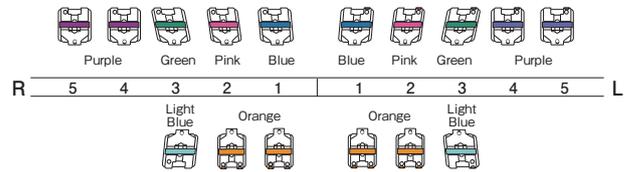

注：サイトゲージはブラケット接着後、スクレーラー、探針等で取り外してご使用ください。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2   1   2		-1°	2°	0°	3.0	L R	168-111L 168-111R	168-112L 168-112R	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3   3		-11°	7°	2°M	3.4	L	168-331L	168-332L	Hook付き
	R					168-331R	168-332R	Hook付き	
						L R	168-313L 168-313R	168-314L 168-314R	
One Patient Kit 1症例キット 3   3 3   3							168-01 168-01SH	168-02 168-02SH	Hook付き
							168-05 168-05SH	168-06 168-06SH	Hook付き

Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6   6		-25°	0°	4°D	4.0	L R	(W)952-611L (W)952-611R	(W)952-612L (W)952-612R	10個/ PK
---	--	------	----	-----	-----	--------	----------------------------	----------------------------	------------

CLIPPY-C  
APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッケルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

## Formula-M (McLaughlin Type\*) Maxillary Arch

クリッピー C 2G フォーミュラー M(マクローフリントタイプ\*)上顎



クリッピー Cをよりコンパクトに設計した“クリッピーC 2G”  
 機能はそのまま継承し、口元の審美性向上と、口腔内の違和感を軽減します。  
 スペックはマクローフリントタイプ、上下5-5でご用意しております。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot		Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		17°	4°	0°	3.2	L R	1675-101L 1675-101R	1675-102L 1675-102R		10個/ PK
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		10°	8°	0°	3.0	L R	1675-201L 1675-201R	1675-202L 1675-202R		
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-7°	8°	0°	3.2	L R	1675-301L 1675-301R	1675-302L 1675-302R	Hook付き Hook付き	
		0°	8°	0°	3.2	L R	1675-305L 1675-305R	1675-306L 1675-306R	Hook付き Hook付き	
Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小臼歯 5 4   4 5		-7°	0°	0°	3.2	L R	1675-401L 1675-401R	1675-402L 1675-402R	Hook付き Hook付き	

## \*Note:

※It does not imply endorsement by doctor.

※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。


Upper 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	3.8	L R	(W)9570-607L (W)9570-607R	(W)9570-608L (W)9570-608R	Mini Type Mini Type	10個/ PK
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	4.0	L R	(W)957-607L (W)957-607R	(W)957-608L (W)957-608R		10個/ PK

# CLIPPY-C APPLIANCES 2G

販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZX00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパツカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器


## Formula-M (McLaughlin Type\*) Mandibular Arch クリッピー C 2G フォーミュラー M(マクローフリン タイプ\*) 下顎

### ブラケット・マーキング色

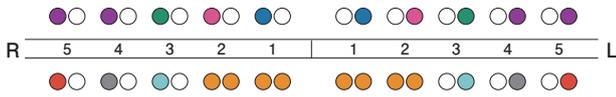

注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。  
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

### ゲージ識別色

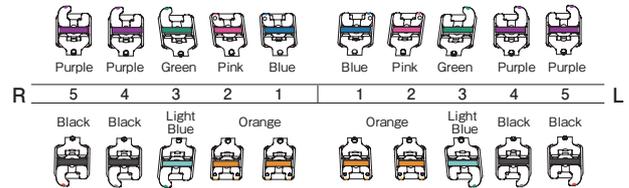

注: ブラケット接着後、サイトゲージを、スクレーラー、探針等で取り外してご使用ください。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2   1   1   2		-6°	0°	0°	2.8	L&R	1675-1110	1675-1120	
		0°	0°	0°	2.8	L&R	1675-1130	1675-1140	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3   3		-6°	3°	0°	3.2	L	1675-311L	1675-312L	Hook付き
		0°	3°	0°	3.2	R	1675-311R	1675-312R	Hook付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小臼歯 4   4		-6°	3°	0°	3.2	L	1675-315L	1675-316L	Hook付き
		0°	3°	0°	3.2	R	1675-315R	1675-316R	Hook付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小臼歯 4   4		-12°	2°	0°	3.2	L	1675-411L	1675-412L	Hook付き
		-12°	2°	0°	3.2	R	1675-411R	1675-412R	Hook付き
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小臼歯 5   5		-17°	2°	0°	3.2	L	1675-511L	1675-512L	Hook付き
		-17°	2°	0°	3.2	R	1675-511R	1675-512R	Hook付き
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3		上下顎犬歯トルクなし 下顎前歯トルク付					1675-13H	1675-14H	Hook付き
		上下顎犬歯トルクなし 下顎前歯トルク付					1675-005HA	1675-006HA	Hook付き
Lower 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 下顎第1大臼歯 6   6		-20°	0°	0°	3.8	L	(W)9570-611L	(W)9570-612L	Mini Type
		-20°	0°	0°	3.8	R	(W)9570-611R	(W)9570-612R	Mini Type
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6   6		-20°	0°	0°	4.0	L	(W)957-611L	(W)957-612L	
		-20°	0°	0°	4.0	R	(W)957-611R	(W)957-612R	

CLIPPY-C  
APPLIANCES販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器  
認証番号：218ADBZX00023000  
販売名：セルフライゲーションパツカルチューブ  
一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器  
認証番号：219ADBZX00191000

## Formula-M (McLaughlin Type\*) Maxillary Arch

クリッピー C フォーミュラー M(マクローフリンタイプ\*)上顎



セラミックボディとロジウムコーティングされたクリップを採用したクリッピー C。ナチュラルな白さを口元にもたらし、審美性を重視したセラミックセルフライゲーティングブラケットです。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		17°	4°	0°	3.4	L R	1685-101L 1685-101R	1685-102L 1685-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		10°	8°	0°	3.2	L R	1685-201L 1685-201R	1685-202L 1685-202R	
		-7°	8°	0°	3.4	L R	1685-321L 1685-321R	1685-322L 1685-322R	Hook付き
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		0°	8°	2°M	3.4	L R	1685-325L 1685-325R	1685-326L 1685-326R	Hook付き
		0°	8°	2°M	3.4	L R	1685-307L 1685-307R	1685-308L 1685-308R	
Upper 1st & 2nd Bicuspid 上顎 第1、2小臼歯 5   4   5		-7°	0°	0°	3.4	L R	1685-401L 1685-401R	1685-402L 1685-402R	Hook付き
		-7°	0°	0°	3.4	L&R	1685-4030	1685-4040	
Upper 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	3.8	L R	(W)9570-607L (W)9570-607R	(W)9570-608L (W)9570-608R	Mini Type
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	4.0	L R	(W)957-607L (W)957-607R	(W)957-608L (W)957-608R	

10個/  
PK10個/  
PK10個/  
PK




販売名：セルフライゲーションセラミックブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZ00023000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパツカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZ00191000 管理医療機器

# Formula-M (McLaughlin Type\*) Mandibular Arch


クリッピー C フォーミュラー M(マクロフリン タイプ\*)下顎

### ブラケット・マーキング色

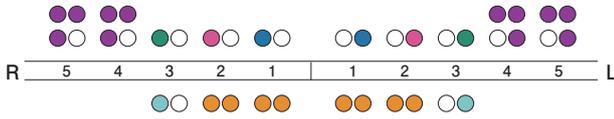

注1: 左右の区別があるブラケットは、遠心歯頸部にのみマーキング。  
 注2: 左右の区別がないブラケットは、歯頸部の近遠心両方にマーキング。

### ゲージ識別色

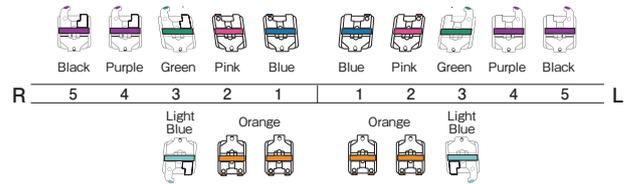

注：ブラケット接着後、サイトゲージを、スクレーラー、探針等で取り外してご使用ください。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity	
Lower Anteriors 下顎前歯 2   1   1   2		-6°	0°	0°	3.0	L&R	1685-1110	1685-1120	10個/ PK	
		0°	0°	0°	3.0	L&R	1685-1130	1685-1140		
Lower Cuspids 下顎犬歯 3   3		-6°	3°	0°	3.4	L	1685-331L	1685-332L		Hook付き
						R	1685-331R	1685-332R		Hook付き
		0°	3°	0°	3.4	L	1685-335L	1685-336L		Hook付き
						R	1685-335R	1685-336R		Hook付き
One Patient Kit 1症例キット 3 ~ 3 3 ~ 3		上下顎犬歯 下顎前歯 トルク付					1685-01SH	1685-02SH	Hook付き	12個/ KIT
5 ~ 5 3 ~ 3		上下顎犬歯 下顎前歯 トルク付					1685-05SH	1685-06SH	Hook付き	16個/ KIT

**\*Note:**

※It does not imply endorsement by doctor.  
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

Lower 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 下顎第1大白歯 6   6		-20°	0°	0°	3.8	L	(W)9570-611L	(W)9570-612L	Mini Type	10個/ PK
						R	(W)9570-611R	(W)9570-612R	Mini Type	
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大白歯 6   6		-20°	0°	0°	4.0	L	(W)957-611L	(W)957-612L		10個/ PK
						R	(W)957-611R	(W)957-612R		

CLIPPY<sup>MicroMini</sup> RC  
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケットS  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器  
 認証番号：224ADBZX00042000

販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント 管理医療機器  
 認証番号：219ADBZX00191000

## Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch

クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラーR (ロスタイプ) 上顎



ブラケット全体にロジウムコーティングを施すことによって、  
 メタルブラケットでありながら、高い審美性を実現しました。  
 また、新たなロープロファイル仕様とコンパクトな形状は、  
 装着後の違和感を軽減します。小白歯はすべてパッシブ仕様。  
 スペックはDr. Rothのオリジナルをご用意しております。




		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		12°	5°	0°	2.8	L	9521-101L	9521-102L	
						R	9521-101R	9521-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		8°	9°	0°	2.6	L	9521-201L	9521-202L	
						R	9521-201R	9521-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-2°	13°	4°M	2.6	L	9521-301L	9521-302L	Post付き
						R	9521-301R	9521-302R	Post付き
		-2°	13°	4°M	2.6	L	9521-303L	9521-304L	
						R	9521-303R	9521-304R	
-2°	9°	4°M	2.6	L	9521-305L	9521-306L	Post付き		
				R	9521-305R	9521-306R	Post付き		
-2°	9°	4°M	2.6	L	9521-307L	9521-308L			
				R	9521-307R	9521-308R			
Upper 1st, 2nd Bicuspid 上顎 第1、2小白歯 5   4   5 PASSIVE仕様		-7°	0°	2°D	2.6	L	9521-P401L	9521-P402L	Post付き
						R	9521-P401R	9521-P402R	Post付き
		-7°	0°	2°D	2.6	L	9521-P403L	9521-P404L	
						R	9521-P403R	9521-P404R	
Upper 1st Molars 上顎 第1大臼歯 6   6		-10°	0°	14°D	4.0	L	(W)952-607L	(W)952-608L	10個/ PK
						R	(W)952-607R	(W)952-608R	

# CLIPPY<sup>MicroMini</sup> RC APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケットS  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：224ADBZ00042000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッシブカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZ000191000 管理医療機器

## Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラーR (ロスタイプ) 下顎

ブラケット・マーキング色

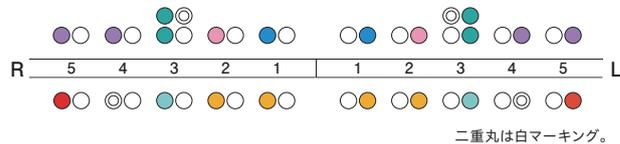

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2   12		-1°	2°	0°	2.6	L	9521-111L	9521-112L	
						R	9521-111R	9521-112R	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3   3		-11°	7°	2°M	2.6	L	9521-311L	9521-312L	Post付き
						R	9521-311R	9521-312R	Post付き
		-11°	7°	2°M	2.6	L	9521-313L	9521-314L	
						R	9521-313R	9521-314R	
Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小白歯 4   4 PASSIVE仕様		-17°	-1°	4°D	2.6	L	9521-P411L	9521-P412L	Post付き
						R	9521-P411R	9521-P412R	Post付き
		-17°	-1°	4°D	2.6	L	9521-P413L	9521-P414L	
						R	9521-P413R	9521-P414R	
Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小白歯 5   5 PASSIVE仕様		-22°	-1°	4°D	2.6	L	9521-P511L	9521-P512L	Post付き
						R	9521-P511R	9521-P512R	Post付き
		-22°	-1°	4°D	2.6	L	9521-P513L	9521-P514L	
						R	9521-P513R	9521-P514R	
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大白歯 6   6		-25°	0°	4°D	4.0	L	(W)952-611L	(W)952-612L	10個/ PK
R	(W)952-611R	(W)952-612R							

CLIPPY<sup>MicroMiniRC</sup>  
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケットS  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：224ADBZ00042000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZ00191000 管理医療機器

### Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-M (Mclaughlin Type\*) Maxillary Arch

クリッピー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラーM (マクローフリンタイプ\*) 上顎



ブラケット全体にロジウムコーティングを施すことによって、  
 メタルブラケットでありながら、高い審美性を実現しました。  
 また、新たなロープロファイル仕様とコンパクトな形状は、  
 装着後の違和感を軽減します。小白歯はすべてパッシブ仕様。  
 スペックはマクローフリンタイプでご用意しております。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity	
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		17°	4°	0°	2.8	L	_____	9571-102L	10個/ PK	
						R	_____	9571-102R		
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		10°	8°	0°	2.6	L	_____	9571-202L		
						R	_____	9571-202R		
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-7°	8°	0°	2.6	L	_____	9571-302L		Post付き
						R	_____	9571-302R		Post付き
		0°	8°	0°	2.6	L	_____	9571-306L		Post付き
						R	_____	9571-306R		Post付き
Upper 1st, 2nd Bicuspids 上顎 第1、2小白歯 5 4   4 5 PASSIVE仕様		-7°	0°	0°	2.6	L	9571-P401L	9571-P402L		Post付き
						R	9571-P401R	9571-P402R		Post付き
		-7°	0°	0°	2.6	L&R	9571-P4030	9571-P4040		


Upper 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	3.8	L	(W)9570-607L	(W)9570-608L	Mini Type	10個/ PK
						R	(W)9570-607R	(W)9570-608R	Mini Type	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	4.0	L	(W)957-607L	(W)957-608L		10個/ PK
						R	(W)957-607R	(W)957-608R		

# CLIPPY<sup>MicroMini</sup> RC APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケットS  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：224ADBZX00042000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

## Clippy MicroMini Rhodium Coating Formula-M (Mclaughlin Type\*) Mandibular Arch クリップー マイクロミニ ロジウムコーティング フォーミュラーM (マクローフリンタイプ\*) 下顎

ブラケット・マーキング色

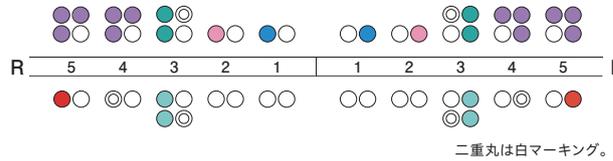

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎 前歯 2   1   2		-6°	0°	0°	2.6	L&R	————	9571-1120	
Lower Cuspids 下顎 犬歯 3   3		-6°	3°	0°	2.6	L	————	9571-312L	Post付き
						R	————	9571-312R	Post付き
Lower 1st Bicuspids 下顎 第1小白歯 4   4 PASSIVE仕様		-12°	2°	0°	2.6	L	9571-P411L	9571-P412L	Post付き
						R	9571-P411R	9571-P412R	Post付き
Lower 2nd Bicuspids 下顎 第2小白歯 5   5 PASSIVE仕様		-12°	2°	0°	2.6	L	9571-P413L	9571-P414L	
						R	9571-P413R	9571-P414R	
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6   6		-17°	2°	0°	2.6	L	9571-P511L	9571-P512L	Post付き
						R	9571-P511R	9571-P512R	Post付き
Lower 1st Molars 下顎 第1大白歯 6   6		-17°	2°	0°	2.6	L	9571-P513L	9571-P514L	
						R	9571-P513R	9571-P514R	

**\*Note:**

※It does not imply endorsement by doctor.

※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

Lower 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 下顎 第1大白歯 6   6		-20°	0°	0°	3.8	L	(W)9570-611L	(W)9570-612L	Mini Type	10個/ PK
						R	(W)9570-611R	(W)9570-612R	Mini Type	
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎 第1大白歯 6   6		-20°	0°	0°	4.0	L	(W)957-611L	(W)957-612L		10個/ PK
						R	(W)957-611R	(W)957-612R		

mini **CLIPPY**  
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッカルトューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

**Formula-R (Roth Type) Maxillary Arch**

ミニクリッピー フォーミュラー R(ロスタイプ)上顎



ツインブラケットとセルフライゲージング機能、そしてフルプログラム化されたプリアジャस्टッドアプライアンス。TOMYの最新テクノロジーがセルフライゲージングブラケットにさらなる進化を与えました。スベックはDr. Rothのオリジナルをご用意しております。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span. mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 <u>1   1</u>		12°	5°	0°	3.0	L	952-101L	952-102L	
						R	952-101R	952-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 <u>2   2</u>		8°	9°	0°	2.8	L	952-201L	952-202L	
						R	952-201R	952-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 <u>3   3</u>		-2°	13°	4°M	3.0	L	952-301L	952-302L	Post付き
						R	952-301R	952-302R	Post付き
		-2°	13°	4°M	3.0	L	952-303L	952-304L	
						R	952-303R	952-304R	
		-2°	10°	4°M	3.0	L	952-305L	952-306L	Post付き
						R	952-305R	952-306R	Post付き
	-2°	10°	4°M	3.0	L	952-307L	952-308L		
R	952-307R	952-308R							
Upper 1st, 2nd Bicuspsids 上顎 第1,2小臼歯 <u>5 4   4 5</u>		-7°	0°	2°D	3.0	L	952-401L	952-402L	Post付き
						R	952-401R	952-402R	Post付き
		-7°	0°	2°D	3.0	L	952-403L	952-404L	
						R	952-403R	952-404R	
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 <u>6   6</u>		-10°	0°	14°D	4.0	L	(W)952-607L	(W)952-608L	10個/ PK
						R	(W)952-607R	(W)952-608R	


mini **CLIPPY**  
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

**Formula-R (Roth Type) Mandibular Arch**

ミニクリッピー フォーミュラー R(ロスタイプ)下顎

ブラケット・マーキング色

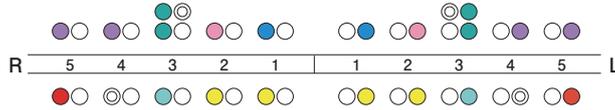

注1：二重丸は白マーキング。

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Lower Anteriors 下顎前歯 2   1   1   2		-1°	2°	0°	2.6	L	952-111L	952-112L	
						R	952-111R	952-112R	
Lower Cuspids 下顎犬歯 3   3		-11°	7°	2°M	3.0	L	952-311L	952-312L	Post付き
						R	952-311R	952-312R	Post付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4   4		-11°	7°	2°M	3.0	L	952-313L	952-314L	10個/ PK
						R	952-313R	952-314R	
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4   4		-17°	-1°	4°D	3.0	L	952-411L	952-412L	Post付き
						R	952-411R	952-412R	Post付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4   4		-17°	-1°	4°D	3.0	L	952-413L	952-414L	10個/ PK
						R	952-413R	952-414R	
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5   5		-22°	-1°	4°D	3.0	L	952-511L	952-512L	Post付き
						R	952-511R	952-512R	Post付き
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5   5		-22°	-1°	4°D	3.0	L	952-513L	952-514L	10個/ PK
						R	952-513R	952-514R	
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大臼歯 6   6		-25°	0°	4°D	4.0	L	(W)952-611L	(W)952-612L	10個/ PK
						R	(W)952-611R	(W)952-612R	

mini CLIPPY  
APPLIANCES

販売名：セルフライゲージングブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲージングパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

## Formula-M (McLaughlin Type\*) Maxillary Arch

ミニクリッピー フォーミュラー M(マクローフリンタイプ\*)上顎



ツインブラケットとセルフライゲージング機能、そしてフルプログラム化されたプリアジャस्टッドアプライアンス。TOMYの最新テクノロジーがセルフライゲージングブラケットにさらなる進化を与えました。スペックはマクローフリンタイプのオリジナルをご用意しております。



		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity
Upper Centrals 上顎 中切歯 1   1		17°	4°	0°	3.0	L R	957-101L 957-101R	957-102L 957-102R	
Upper Laterals 上顎 側切歯 2   2		10°	8°	0°	2.8	L R	957-201L 957-201R	957-202L 957-202R	
Upper Cuspids 上顎 犬歯 3   3		-7°	8°	0°	3.0	L R	957-301L 957-301R	957-302L 957-302R	Post付き
		-7°	8°	0°	3.0	L R	957-303L 957-303R	957-304L 957-304R	
Upper 1st & 2nd Bicuspids 上顎 第1,2小臼歯 5 4   4 5		0°	8°	0°	3.0	L R	957-305L 957-305R	957-306L 957-306R	Post付き
		-7°	0°	0°	3.0	L R L&R	957-401L 957-401R 957-4030	957-402L 957-402R 957-4040	Post付き
Upper 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	3.8	L R	(W)9570-607L (W)9570-607R	(W)9570-608L (W)9570-608R	Mini Type
Upper 1st Molars CLIPPY TUBE 上顎 第1大臼歯 6   6		-14°	0°	10°D	4.0	L R	(W)957-607L (W)957-607R	(W)957-608L (W)957-608R	


mini **CLIPPY**  
APPLIANCES

販売名：セルフライゲーションブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：21200BZZ00319000 管理医療機器  
 販売名：セルフライゲーションパッカルチューブ  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：219ADBZX00191000 管理医療機器

**Formula-M (McLaughlin Type\*) Mandibular Arch**

ミニクリッピー フォーミュラー M(マクロフリンタイプ\*)下顎

ブラケット・マーキング色

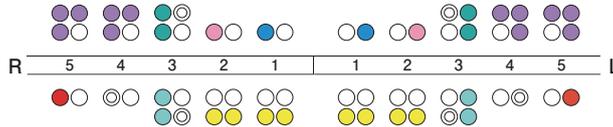

		Torque, Degrees	Angu., Degrees	Offset, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	.022" Slot	Quantity	
Lower Anteriors 下顎前歯 2   1   2		-6°	0°	0°	2.6	L&R	957-1110	957-1120	10個/ PK	
		0°	0°	0°	2.6	L&R	957-1130	957-1140		
		-6°	3°	0°	3.0	L	957-311L	957-312L		Post付き
						R	957-311R	957-312R		Post付き
Lower Cuspids 下顎犬歯 3   3		-6°	3°	0°	3.0	L	957-313L	957-314L		
						R	957-313R	957-314R		
		0°	3°	0°	3.0	L	957-315L	957-316L		Post付き
						R	957-315R	957-316R		Post付き
Lower 1st Bicuspids 下顎第1小白歯 4   4		-12°	2°	0°	3.0	L	957-411L	957-412L		Post付き
						R	957-411R	957-412R		Post付き
		-12°	2°	0°	3.0	L	957-413L	957-414L		
						R	957-413R	957-414R		
Lower 2nd Bicuspids 下顎第2小白歯 5   5		-17°	2°	0°	3.0	L	957-511L	957-512L		Post付き
						R	957-511R	957-512R		Post付き
		-17°	2°	0°	3.0	L	957-513L	957-514L		
						R	957-513R	957-514R		

**\*Note:**  
 ※It does not imply endorsement by doctor.  
 ※このタイプはドクターの承認を得ているものではありません。

Lower 1st Molars CLIPPY MINI TUBE 下顎第1大白歯 6   6		-20°	0°	0°	3.8	L	(W)9570-611L	(W)9570-612L	Mini Type	10個/ PK
						R	(W)9570-611R	(W)9570-612R	Mini Type	
Lower 1st Molars CLIPPY TUBE 下顎第1大白歯 6   6		-20°	0°	0°	4.0	L	(W)957-611L	(W)957-612L		10個/ PK
						R	(W)957-611R	(W)957-612R		

CLIPPY L  
APPLIANCES

## Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 舌側用 セルフライゲーティング ブラケット

## CLIPPY Lの特長

## ロープロファイル

ブラケットの厚みが非常に薄く、装着後の違和感を軽減します。



## With Hook

5～5までのブラケットは、フック付の有無を選択できます。舌感を考慮した幅広フック、深い懐は操作性を向上させます。3～3はダイレクトボンディングにも便利なポジショニング用センターラインを付与しました。



## With Lingual Sheath

パラタルアーチバーが装着可能なリンガルシース付もラインナップ。シース部も違和感を軽減させる、ハイトを低く抑えた設計。中央部には食物残渣の除去を容易にするために、穴を設けました。

## セルフライゲーティング

独自のクリップ構造は、開閉が簡単で、リンガルでの面倒な結紮を必要としません。煩わしさを解消します。



## ボンディングベース

舌側形態に合わせた形状のボンディングベースを採用しました。リンガルフォッサの深いところに接着可能です。



## CLIPPY L 2Gの特長

探針での開閉が可能な  
オープニングホールを付与

クリップの開けすぎを防止する  
ストッパー機能を追加

歯肉へのクリアランスを考慮した  
フック形状

結紮を重視した  
ウイング形状



## Lingual Self-Ligating Brackets


クリッピー L 舌側用 セルフライゲータリング ブラケット

### クリップの開閉方法

#### OPEN



#### CLOSE

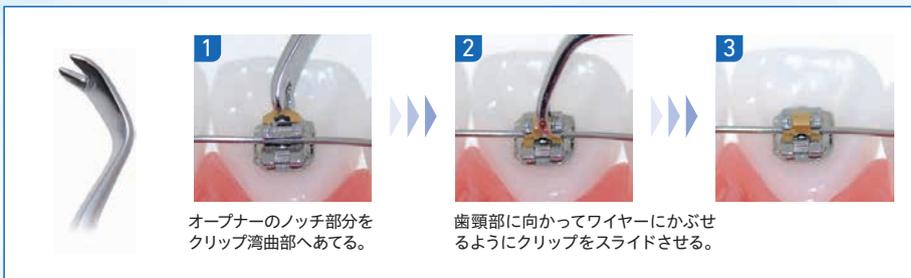

### 専用オープニングツール



813-1090

#### クリッピーL オープナー

販売名：クリッピーL オープナー  
 一般的名称：歯科矯正用結さつ器  
 届出番号：11B3X00012000061 一般医療機器

### クリップクローズングアシストツール



813-1091

#### キーズ トーカー

販売名：キーズ トーカー  
 一般的名称：歯科矯正用結さつ器  
 届出番号：11B3X00012000062 一般医療機器

# SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM



## Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 舌側用 セルフライゲーティング ブラケット



セルフライゲーティングシステムを採用。独自のクリップ構造は、開閉が簡単でリンガルでの面倒な結紮を必要としません。また、ロープロファイルを実現。ブラケットの厚みが非常に薄く、装着後の違和感を軽減します。

		Torque, Degrees	Span, mm	Left/Right	.018" Slot	Quantity
Up. Centrals & Laterals & Cuspids 上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 3 2 1   1 2 3		60°	2.2	L&R	991-11H	Hook付き
				L&R	991-11	
		60°	2.2	L&R	992-11	ラージベース
Lo. Anteriors & Cuspids 下顎 前歯 & 犬歯 3 2 1   1 2 3		50°	2.2	L&R	991-51H	Hook付き
				L&R	991-51	
		50°	2.2	L&R	992-51	ラージベース
Lo. Anteriors 下顎 前歯 2 1   1 2		50°	1.6/2.0	L&R	991-57	ナロータイプ
Up. & Lo. 1st, 2nd Bicuspids 上・下顎 第1、2小臼歯 5 4   4 5 5 4   4 5		10°	2.2	L&R	991-47H	Hook付き
		3.2	L&R	991-45		
Upper Molars 上顎 大臼歯 7 6   6 7		10°	3.8	L	991-607L	Hook付き
	R			991-607R	Hook付き	
上顎 大臼歯 WELD用 シース付 6   6		10°	3.8	L&R	W991-6050	WELD用 シース付き
Lower Molars 下顎 大臼歯 7 6   6 7		0°	3.8	L	991-611L	Hook付き
				R	991-611R	Hook付き
One Patient Kit 1症例キット 6 ~ 6 6 ~ 6					991-0021 991-0021H	Hook付き

5個/  
PK24個/  
KIT

# CLIPPY L 2G APPLIANCES

販売名：リンガルブラケット  
 一般的名称：歯列矯正用アタッチメント  
 認証番号：218ADBZX00054000 管理医療機器

## Lingual Self-Ligating Brackets

クリッピー L 2G 舌側用 セルフライゲーティング ブラケット

# CLIPPY L 2G



結紮がしやすいウィング形状と、クリップのオープニングホールやストッパーなど、開閉をアシストする新機能が特徴的です。

		Torque, Degrees	Span, mm	Left/ Right	.018" Slot	Quantity
Up. Centrals & Laterals & Cuspids 上顎 中切歯 & 側切歯 & 犬歯 3 2 1   1 2 3	3B	60°	2.2	L&R	9910-11H <span>Hook付き</span>	5個/ PK
	1B			L&R	9910-11	
Lo. Anteriors & Cuspids 下顎 前歯 & 犬歯 3 2 1   1 2 3	3B	50°	2.2	L&R	9910-51H <span>Hook付き</span>	
	1B			L&R	9910-51	



# SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM